

INCUBADORA AUTO-READER CLEAN-TEST

12 Cavidades
Resposta negativa em
20 minutos, 1 hora ou 3 horas



Característica:

- Incubadora conforme ISO 11138-8
- Incubadora de indicadores biológicos CLEAN-TEST a 60°C
- Interface de usuário para inserção e visualização de dados
- Possibilidade de registro impresso dos resultados

A Incubadora Auto-Reader Clean Test foi projetada para incubar e realizar leituras automáticas de Indicadores biológicos Clean Test para vapor de leitura rápida e super rápida à 60°C para um resultado negativo de leitura de fluorescência em 3 horas, 1 hora ou 20 minutos. Somente indicadores biológicos (IB's) compatíveis com este processo podem ser utilizados neste equipamento.

A Auto-Reader Clean Test possui uma tela para acompanhamento dos testes, a mesma é sensível ao toque possibilitando a interação com o equipamento. Informações como responsável, lote do IB, lote de esterilização, ciclo de esterilização poderão ser inseridas durante a incubação do IB. Estas serão impressas juntamente com o resultado final de incubação, data, horário final de incubação e campo para assinatura. Desta forma, é gerado um registro completo do processo. A impressora é um item opcional e quando instalada, realiza a impressão automaticamente assim que finalizada a incubação.

Funções

- 1 - Cavidades de incubação
- 2 - Cavidade para quebra de I.B.
- 3 - Interface do usuário touchscreen
- 4 - Alimentação elétrica: 12 VDC/3A
(Acompanha Fonte Bivolt)
- 5 - Saída serial para impressora

